

	Mintavétel	Mintavétel indikációja	Mintavételi eszköz, transzporteszköz és térfogat	Tárolás, szállítás	Negatív eredmény	Pozitív eredmény	Megjegyzés
Mikológia	Dermatológiai minták (hám-, körömkaparek, hajszál) mikológiai tenyésztésre és mikroszkópos vizsgálatra történő vétele: A mintázandó felszint 70%-os alkohollal, vagy éter : alkohol 1:1 arányú keverékével tisztítjuk meg. Mintavételi eszközként steril kaparóeszközök (szike, fogászati kaparó, oltókacs, csipesz) felelnek meg. Pihező bőrről a lézió széléről vesszük a kaparekot. Hajas fejbőr superficialis mikózisából kaparással vagy csipesszel tudunk hajszálcsonkokat, hámkaparekot nyerni. Körömelváltozások esetében a frissen fertőzött területekről tudunk értékelhető mintát venni (körömkaparek), az eltávolított kisebb-nagyobb körömdarabok nem alkalmasak a vizsgálatra. Pityriasis versicolor és seborrhoeas dermatitis esetében a cellulcsíkos mintavétel javasolt. A kaparekokat, két tárgylemez közé rakjuk, melynek széléit leragasztjuk, vagy erre a célra hajtogatott kis, sötét papírborítékba, Petri-esészébe helyezzük. A cellulcsíkos preparátumot tárgylemezre ragasztjuk. Kezelt elváltozásról a gombakimutatas esélye minimális, ezért előzetes terápia esetén a beteget visszarendeljük későbbi mintavétel céljából. Fontos, hogy a minták minél előbb a laboratóriumba kerüljenek. A gombákkal fertőzött hajszálcsonkok fájdalommentesen, puhán kihúzhatók.	A bőr és függelékeinek gombás elváltozása	A bőr és függelékeinek gombás elváltozása+D2	Szobahőmérsékleten	30 nap	30-90 nap	