

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 1/30

Akkreditált vizsgálatok
Betegellátást (járó- és fekvő) szolgáló diagnosztikus vizsgálatok

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Bakteriológia Részleg					
Légúti minták, szemváladék	Aerob patogén baktériumok kimutatása; mikroszkópos vizsgálat, tenyésztés és csíraszám meghatározás 1, 2, 3: alsó légúti minták, szemvál.	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Mini BAL esetén szemikvantitatív csíraszám meghatározás, kórokozó kimutatása	Negatív: 1-2 nap Pozitív: 2-4 nap	Editor: Henry D. Isenberg: Clinical Microbiology Procedures Handbook (CMPH) American Society for Microbiology/ Washington, D. C. 2. kiadás 2004. 3.11.
Felületes sebváladékok, centrális kanülök, draineik, normálisan steril testfolyadékok	Aerob patogén baktériumok kimutatása tenyésztéssel és mikroszkópos vizsgálattal 1,2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Centrális kanülök esetén szemikvantitatív csíraszám meghatározás, kórokozó kimutatása	Negatív: 1-2 nap Pozitív: 2-4 nap	CMPH 3.5., 3.7., 3.13.
Vizelet	Uropatogén baktériumok kimutatása; tenyésztés és csíraszám meghatározása 1,2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Szemikvantitatív csíraszám meghatározás	Negatív: 1-2 nap Pozitív: 2-4 nap	MIKR-MU-BAKT VIZ 02 07
Vizelet	Antibakteriális anyag kimutatása 1,2	biológiai módszer	Pozitív/negatív	1 nap	A klasszikus húgyúti infekciók mikrobiológiai diagnosztikája - az Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium módszertani levele - 2005. december-5. oldal
Urogenitális minták	Urogenitális mintákból patogén baktériumok kimutatása, hüvelyből Lactobacillus flóra, bakteriális vaginózis kimutatása mikroszkópos és tenyésztési vizsgálattal 1,2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap Anaerob tenyésztés esetén: 5-7 nap	CMPH 3.9.
Urogenitális minták	Várandós nők <i>Streptococcus agalactae</i> -szűrése	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	<i>Streptococcus agalactae</i> kimutatása	Negatív: 2-3 nap Pozitív: 2-4 nap	MIKR-MU-BAKT STD 04 03 <i>RUGALMAS TERÜLET</i> (Előírás változás követésére)
Vér	Aerob, anaerob baktériumok és gombák tenyésztése hemokultúra automatában, mikroszkópos és telepmorfológiai vizsgálat 1, 2	Hemokultúra automata	Automata jelzés pozitivitás esetén	Negatív: 5-21 nap Pozitív: Pozitívjelzést követő 2 nap	Klinikai és Járványügyi Bakteriológia (KJB) Szerk: Czirók Éva 1999 Melánia I.1.1., I.3.1.1.
Aerob baktérium tenyészet	Baktérium azonosítás hagyományos biokémiai módszerrel, mikroszkópos, telepmorfológiai vizsgálat 1, 2	Hagyományos módszerekkel	Baktérium azonosítás species szintig	1-2 nap	KJB II. 1.1., II. 1.4.2.

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 2/30

Akkreditált vizsgálatok

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Bakteriológia Részleg					
Aerob baktérium tenyészet	Baktérium azonosítás biokémiai vizsgálaton alapuló automata módszerrel 1, 2	VITEK 2 automatával	Baktérium azonosítás species szintig	1-2 nap	VITEK 2 Kezelői Kézikönyv (bioMérieux)
Baktérium tenyészet	Baktérium azonosítás MALDI-TOF tömegspektrometrián alapuló automata módszerrel 1,2	MALDI-TOF tömegspektrometria	Baktérium azonosítás species szintig	1-2 nap	MIKR-MU-BAKT-ÁLT 02 03 <i>RUGALMAS TERÜLET (Előírás változás követésére)</i>
Műtéti minták, normálisan steril testfolyadékok	Anaerob baktériumok irányába történő tenyésztés, mikroszkópos és telepmorfológiai vizsgálat 1, 2, 3	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása	2-7 nap	Wadsworth-KTL Anaerobic Bacteriology Manual , 6th edition, 2002, Star Publishing Company, Belmont, California (Wadsworth-KTL) Chapter 2-3
Anaerob baktérium tenyészet	Baktérium azonosítása biokémiai módszerrel, mikroszkópos, telepmorfológiai vizsgálat 1	Hagyományos módszerekkel	Species szintig	4-7 nap	Wadsworth-KTL Chapter 4, 5, 6, 7
Baktérium tenyészet	Baktériumok antibiotikumok iránti érzékenységének fenotípusos vizsgálata korongdiffúziós módszerrel 1, 2	Korongdiffúziós módszer	Szemikvantitatív értékelés (É,MÉ,R)	1-2 nap	MIKR-MU-BAKT-ÁLT 04 11 <i>RUGALMAS TERÜLET (Előírás változás követésére)</i>
Aerob és anaerob baktérium tenyészet	Baktériumok antibiotikumok iránti érzékenységének fenotípusos vizsgálata gradiens diffúziós módszerrel 1, 2 (aerob)	Gradiens diffúziós módszer	MIC érték (minimális gátlási koncentráció) meghatározás	1-2 nap	MIKR-MU-BAKT-ÁLT 05 10 <i>RUGALMAS TERÜLET (Előírás változás követésére)</i>
Vizelet, liquor, hemokultúra, baktérium tenyészet	Szolubilis antigén kimutatás latex agglutinációval 1,2,3	Latex agglutináció	Antigén kimutatása	1 nap	MIKR-MU-BAKT-ÁLT 07 08 <i>RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)</i>

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 3/30

Akkreditált vizsgálatok

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Enterális vizsgálatok					
Széklek	Enterális patogén baktériumok kimutatása tenyésztéssel, szelektív táptalajon 1, 2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap	CMPH 3.8.1
Baktérium tenyésztet Eozin-metilénkék táptalajon 1 év alatti csecsemők székletéből	Enteropatogén <i>E. coli</i> kimutatása tárgylemez agglutinációval 1, 2	Tárgylemez agglutináció	Kórokozó kimutatása	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap	KJB III, 1.4.1.3./b
Enterális patogén baktérium tenyésztet	<i>Salmonella</i> spp-ek, <i>Shigella</i> spp, <i>Yersinia enterocolitica</i> azonosítása hagyományos biokémiai módszerrel 1, 2	Hagyományos biokémiai módszer	Kórokozó kimutatása	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap	CMPH 3.8.1.
Széklek	<i>Clostridium difficile</i> kimutatása szelektív táptalajon történő tenyésztéssel, mikroszkópos és telepmorfológiai vizsgálat 1, 2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Species szintű meghatározás	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap	Wadsworth-KTL Chapter 7 :133-138
Széklek/ <i>Clostridium difficile</i> baktérium tenyésztet	<i>Clostridium difficile</i> toxinok kimutatása: membrán enzim immunoassay módszerrel 1,2	Membrán enzim-immunoassay	Toxin kimutatás	1 nap	MIKR-MU-BAKT-ENT 07 03 <i>RUGALMAS TERÜLET</i> (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Széklek	<i>Helicobacter pylori</i> antigén kimutatás immunkromatográfiás módszerrel 1	Immunkromatográfia	Antigén kimutatása, kvalitatív meghatározás	1-3 nap	MIKR-MU ENT 13 03 <i>RUGALMAS TERÜLET</i> (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Széklek	<i>Clostridium difficile</i> GDH antigén kimutatása: EIA módszerrel 1	EIA	Antigén kimutatása	1-3 nap	MIKR-MU-BAKT ENT 08 03 <i>RUGALMAS TERÜLET</i> (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Széklek	<i>Clostridium difficile</i> GDH antigén kimutatása membrán enzim immunoassay módszerrel 1,2	Membrán enzim-immunoassay	Antigén kimutatása	1 nap	MIKR-MU-BAKT-ENT 07 03 <i>RUGALMAS TERÜLET</i> (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 4/30

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Virológia-Szerológia-Molekuláris Biológia Részleg					
Szérum, plazma, liquor	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> specifikus IgM antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	ELISA	Kvalitatív és Kvantitatív	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 12 03 5/1 (IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma, liquor	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> specifikus IgG antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	ELISA	Kvalitatív és Kvantitatív	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 12 03 5/1 (IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma, liquor	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> specifikus IgM antitest kimutatás Western blot módszerrel	Western blot	Kvalitatív	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 12 03 5/2 (IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma, liquor	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> specifikus IgG antitest kimutatás Western blot módszerrel	Western blot	Kvalitatív	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 12 03 5/2 (IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	<i>Treponema pallidum</i> specifikus antitest (IgM+IgG) kimutatás ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív meghatározás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 13 03 5/1. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Cytomegalovírus specifikus antitest kimutatása (IgM) ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/1 (IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Cytomegalovírus specifikus antitest kimutatása (IgG) ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/1 (IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Herpes simplex ½ specifikus antitest kimutatása (IgM) ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/2 (IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Herpes simplex ½ specifikus antitest kimutatása (IgG) ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/2 (IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 5/30

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Virologia-Szerológia-Molekuláris Biológia Részleg					
Szérum, plazma	Epstein-Barr vírus specifikus antitest (anti-VCA IgM) kimutatása ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/3 (anti-VCA IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Epstein-Barr vírus specifikus antitest (anti-VCA IgG) kimutatása ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/3 (anti-VCA IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Epstein-Barr vírus specifikus antitest (EBNA elleni IgG) kimutatása ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 07 03 5/3 (anti-EBNA IgG) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis A vírus specifikus antitest (IgG+IgM) kimutatás ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 06 03 5/1 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis A vírus specifikus antitest (IgG+IgM) kimutatás ELFA módszerrel 1, 4	ELFA	Kvalitatív és kvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 06 03 5/2 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis A vírus specifikus IgM kimutatás ELFA módszerrel 1, 4	ELFA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 06 03 5/3 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	HBsAg kimutatása ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 04 03 5/1 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	HBsAg kimutatása ELFA módszerrel 1, 4	ELFA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIK-MU-VIR 04 03 5/2 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 6/30

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Virologia-Szerológia-Molekuláris Biológia Részleg					
Szérum, plazma	HBsAg pozitívnak bizonyuló mintákban a hepatitis B „surface” antigén jelenlétének megerősítése ELFA módszerrel 1, 4	ELFA	Kvalitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 04 03 5/3 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis B vírus „surface” antigén ellenes antitest (anti-HBs) kimutatása ELISA módszerrel 1	ELISA	Kvantitatív és kvalitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 04 03 5/4 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis B vírus „core” antigén ellenes antitest (anti-HBc, (IgG+IgM)) kimutatása ELISA módszerrel 1	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 04 03 5/5 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis C vírus elleni antitest (IgM+IgG) kimutatása ELISA módszerrel 1, 4	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 05 03 5/1. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Hepatitis C vírus elleni antitest (IgM+IgG) kimutatása ELFA módszerrel 1, 4	ELFA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 05 03 5/2. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	HIV-1/2 antitest és HIV-1 p24 antigén kimutatása ELISA módszerrel 1	ELISA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 08 03 5/1 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	HIV-1/2 antitest és HIV-1 p24 antigén kimutatása ELFA módszerrel 1	ELFA	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 08 03 5/2 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Szérum, plazma	Morbillivírus specifikus IgG antitest kimutatása EIA módszerrel 1	EIA	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	MIKR-MU-VIR 10 03 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 7/30

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Viroológia-Szerológia-Molekuláris Biológia Részleg					
Plazma	Hepatitis B vírus nukleinsav kimutatása kvantitatív real-time PCR módszerrel 1	PCR	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	MIKR-MU-MOL 04 04 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Plazma	Hepatitis C vírus nukleinsav kimutatása kvantitatív real-time PCR módszerrel 1	PCR	Kvantitatív és kvalitatív kimutatás	1-21 nap	MIKR-MU-MOL 03 04 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Cervix, vagina, urethra, vizelet	<i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> nukleinsav kimutatás real-time PCR módszerrel 1	PCR	Kvalitatív kimutatás	1-14 nap	MIKR-MU-MOL 05 04 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Parazitológia-Szerológia-Mikológia Részleg					
Vérsavó	<i>Helicobacter pylori</i> -elleni IgG antitest kimutatása ELISA-módszerrel 1	ELISA	Szemikvantitatív meghatározás	1-14 nap	MIKR-MU PARA 06 03 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Humán minták	Gombatenyésztés Sabouraud agaron 1, 2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Szemikvantitatív csíraszám meghatározás	1-7 nap	CMPH 8.4.1., 8.5.1
Sarjadzó gomba tenyészet	Sarjadzó gomba izolátum azonosítása morfológiai vizsgálatok alapján 1	Hagyományos módszerekkel morfológiai vizsgálatok alapján	Species szintű meghatározás	2-7 nap	CMPH 8.5.1., 8.6.1., 8.8.1.
Sarjadzó gomba tenyészet	Sarjadzó gomba izolátum azonosítása biokémiai vizsgálaton alapuló identifikáló rendszerrel. 1	Auxacolor2 kit	Species szintű meghatározás	2-7 nap	MIKR-MU MIKO 02 11 5.5.4. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Sarjadzó gomba tenyészet	Sarjadzó gomba izolátum antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata gradiens diffúziós módszerrel 1, 2	Gradiens diffúziós módszer	MIC meghatározás	1-3 nap	MIKR-MU MIKO 06 03 5.5.1. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Viroológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 8/30

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Parazitológia-Szerológia-Mikológia Részleg					
Sarjadzó gomba tenyészet	Sarjadzó gomba izolátum antifungális szerek iránti érzékenysége vizsgálatára leves mikrohitós módszerrel 1, 2	Sensititre YeastONE kit	MIC meghatározás	1-3 nap	MIKR-MU MIKO 06 03 5.5.2. RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó, mini BAL	<i>Aspergillus</i> (galactomannán) antigén kimutatása ELISA-módszerrel 1, 4	ELISA	Szemikvantitatív és/vagy kvalitatív meghatározás	1-3 nap	MIKR-MU MIKO 03 07 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Urogenitális minta	<i>Trichomonas vaginalis</i> mikroszkópos kimutatása előtenyésztés után 1	Tenyésztés, mikroszkópos vizsgálat	Kórokozó kimutatása	1-2 nap	CMPH 9.5.1.
Vérsavó	<i>Toxocara canis</i> -elleni IgG antitest kimutatása ELISA-módszerrel 1,4	ELISA módszerrel	Szemikvantitatív meghatározás	1-14 nap	MIKR-MU-PARA 04 03 RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó	<i>Echinococcus granulosus</i> -elleni antitest kimutatása IHA-módszerrel 1,4	IHA	Szemikvantitatív meghatározás	1-3 nap	MIKR-MU PARA 02 03 (Echinococcosis) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó	<i>Toxoplasma gondii</i> -elleni antitest screening (IgM+IgG) ELFA-módszerrel.	ELFA	Szemikvantitatív meghatározás	1-7 nap	MIKR-MU-PARA 03 03 (VIDAS Competition) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó	<i>Toxoplasma gondii</i> -elleni IgM antitest kimutatása ELFA-módszerrel 1,4	ELFA	Szemikvantitatív meghatározás	1-7 nap	MIKR-MU-PARA 03 03 (VIDAS TOXO IgM) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerologia-molekularis biologia , valamint a Parazitologia-szerologia-mikologia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 9/30

Akkreditált vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Akkreditálás alá vont vizsgálat azonosítója
Parazitológia-Szerológia-Mikológia Részleg					
Vérsavó	<i>Toxoplasma gondii</i> -elleni IgG antitest kimutatása ELFA-módszerrel 1,4	ELFA	Szemikvantitatív meghatározás	1-7 nap	MIKR-MU-PARA 03 03 (VIDAS TOXO IgG II) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó	<i>Toxoplasma gondii</i> -elleni IgA antitest kimutatása ELISA-módszerrel 1,4	ELISA	Szemikvantitatív meghatározás	1-7 nap	MIKR-MU PARA 03 03 (<i>T. gondii</i> IgA) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)
Vérsavó	<i>Toxoplasma gondii</i> -elleni antitest kimutatása és IgG aviditás vizsgálata ELFA-módszerrel 1	ELFA módszerrel	Szemikvantitatív meghatározás	1-7 nap	MIKR-MU-PARA 03 03 (<i>T. gondii</i> IgG aviditás) RUGALMAS TERÜLET (Gyári kit követésére és az alkalmazott mérőrendszert érintő változások követésére)

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 10/30

Akkreditált vizsgálatok
Vízmikrobiológiai vizsgálatok

<i>A vizsgált termék/anyag</i>	<i>A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, mérési tartomány^{1*} mérési bizonytalanság</i>	<i>A vizsgálati/mérési módszer azonosítója</i>
Ivóvíz (vezetékes ivóvíz, felszín alatti víz)	Telepszám meghatározása 22°C-on Tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat lemezöntéssel	MSZ EN ISO 6222:2000
	Telepszám meghatározása 37°C-on Tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat lemezöntéssel	MSZ EN ISO 6222:2000
	<i>Escherichia coli</i> kimutatása és száma. Membránszűréssel.	MSZ EN ISO 9308-1:2015
	Coliform baktériumok kimutatása és száma. Membránszűréssel.	MSZ EN ISO 9308-1:2015.
	Szulfitredukáló anaerob spóráképző baktériumok (<i>Clostridium</i>) csíraszámának meghatározása Tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat	MSZ 448-44:1990. 4.5. (Visszavont szabvány)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> száma. Membránszűréssel.	MSZ EN ISO 16266:2008
	<i>Enterococcus</i> ok száma Membránszűréssel.	MSZ EN ISO 7899-2:2000
	Üledék mennyisége (szeszton térfogata) Térfogatmérés Mikroszkópos biológiai vizsgálat.	MSZ 448-36:1985
	Üledék minősége, szervezetszám Vas- és mangánbaktériumok, Kénbaktériumok, Szennyezettséget jelző baktériumok, Cianobaktériumok és algák, Gombák, Házasszerű baktériumok, Egyéb véglények, Fonálférgek, Egyéb férgek, Egyéb (gerinctelen) szervezetek Mikroszkópos biológiai vizsgálat	MSZ 448-36:1985

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 11/30

NEM akkreditált vizsgálatok
Betegellátást (járó és fekvő) szolgáló egyéb diagnosztikus vizsgálatok

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Bakteriológia					
Vegyes humán vizsgálati anyag	Ritka/különleges körülményeket igénylő bakteriális kórokozók tenyésztése vegyes humán anyagból (<i>Legionella</i> , <i>Bordetella</i> ,) (előzetes megbeszélés alapján) 1	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Genus/species szintű kimutatás	5-21 nap	
Vizelet	Vizeletből <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigén kimutatás 1, 2, 3	Immunkromatográfia	Antigén kimutatása	1 nap	
Vizelet	Vizeletből <i>Legionella pneumophila</i> serogroup 1, antigén kimutatás 1, 2, 3	Immunkromatográfia	Antigén kimutatása	1 nap	
Genitális minta, első sugár vizelet	<i>Mycoplasma hominis</i> és <i>Ureaplasma sp.</i> diagnosztizálása urea és arginin hidrolízisen alapuló kittel 1, 2	Mycfast screening <i>Revolution</i> kit/ MYCO WELL D-ONE kit	Szemikvantitatív csíraszám meghatározás és antibiotikum érzékenység vizsgálat	Negatív: 2 nap Pozitív: 3-4 nap	
Enterális patogén baktérium tenyészet	<i>Campylobacter</i> spp. azonosítás species szinten biokémiai vizsgálattal 1, 2	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása	Negatív: 2 nap Pozitív: 2-4 nap	
Vizelet	<i>Corynebacterium urealyticum</i> tenyésztése	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása	5 nap	
Vegyes humán vizsgálati anyag	MRSA szűrés betegek és dolgozók részére 1	Az IKAB módszertani levelében leírtak szerint	MRSA kvalitatív kimutatása	2-4 nap	
széklet vegyes humán anyagból	Multirezisztens kórokozók (ESBL termelő baktérium, VRE, CPE, MPAGE stb.) jelenlétének kimutatása székletből és vegyes humán anyagból 1	Hagyományos módszerekkel, táptalajokon	Kvalitatív kimutatás	2-4 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 12/30

NEM akkreditált vizsgálatok Betegellátást (járó és fekvő) szolgáló egyéb diagnosztikus vizsgálatok					
Mikológia					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Vegyes humán vizsgálati anyag	Fonolas gombák izolálása, identifikálása 1	Hagyományos módszerekkel, táptalajon	Kórokozó kimutatása, azonosítása	1-30 nap	
Fonolas gomba tenyészet	Fonolas gombák antifungális szerek iránti érzékenységeinek meghatározása 1	Gradiens diffúziós módszer	MIC-érték meghatározás	1-30 nap	
Szérum, plazma, liquor, Mini BAL	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigén kimutatása immunkromatográfiás módszerrel 1,4	Immunkromatográfia	Kvalitatív meghatározás	1 nap	
Vérsavó	<i>Candida albicans</i> -elleni antitestek kimutatása ELISA-módszerrel 1,4	ELISA	Szemikvantitatív meghatározás	1-30 nap	
Vérsavó	1,3-beta-D-glükán antigénkimutatás	Turbidimetria	Antigénkimutatás, kvantitatív meghatározás	1-3 nap	Térítéses vizsgálat
Parazitológia					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Szemészeti minták, liquor	Szabadon élő amoeba tenyésztése 1	Hagyományos módszerekkel, táptalajon, -folyadékban	Kórokozó kimutatása	1-6 nap	
Epe, cisztabennék, duodenumnedv, vizelet	Parazita mikroszkópos kimutatása natív készítményben 1	Mikroszkópos vizsgálat	Kórokozó kimutatása, azonosítása	1-4 nap	
Eltávolított, ürített parazita	Parazita azonosítása 1	Mikroszkópos vizsgálat	Kórokozó azonosítása	1-4 nap	
Széket	<i>E. histolytica</i> antigén kimutatása ELISA-módszerrel 1	ELISA	Antigén kimutatása, kvalitatív meghatározás	1-7 nap	
Vér	Vérparaziták kimutatása 1	Festett kenet, mikroszkópos vizsgálat	Kórokozó kimutatása, azonosítása	1-3 nap	
Vér	<i>Plasmodium malariae</i> , <i>P. vivax</i> , <i>P. ovale</i> és <i>P. falciparum</i> antigének kimutatása vérből 1,2,3	Immunkromatográfia Immunoquick Malaria +4; 5534 (BIOSYNEX S.A.; 2011.02.25.)	Kvalitatív meghatározás	1 nap	
Vér, liquor, agyszövet, plazma, magzatvíz, szemészeti minta	<i>Toxoplasma gondii</i> nukleinsav kimutatás Real-Time PCR módszerrel 1,4	Real-Time PCR <i>Toxoplasma gondii</i> Real-TM (Sacace)	Kvalitatív	1-4 nap	
Vérsavó	Parazita-ellenes antitest kimutatása IHA-módszerrel (Amoebiasis) 1,4	IHA Dade Behring Cellognost® Amoebiasis OTMO 017 (Siemens)	Szemikvantitatív meghatározás	1-3 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 13/30

NEM akkreditált vizsgálatok Betegellátást (járó- és fekvő) szolgáló egyéb diagnosztikus vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Virológia-Szerológia-Molekuláris Diagnosztika					
Szérum, plazma	<i>Bartonella henselae</i> és <i>Bartonella quintana</i> IgM antitest kimutatás IFA módszerrel 1	Indirekt immunfluoreszcencia	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Bartonella henselae</i> és <i>Bartonella quintana</i> IgG antitest kimutatás IFA módszerrel 1	Indirekt immunfluoreszcencia	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Chlamydia pneumoniae</i> , IgM antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	NovaLisa Chlamydia pneumoniae IgM Ref: CHLM0510 NovaTec (Germany)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Chlamydia pneumoniae</i> , IgG antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	NovaLisa Chlamydia pneumoniae IgG Ref: CHLG0510 NovaTec (Germany)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>M. pneumoniae</i> IgA antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	Serion ELISA classic <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA Ref: ESR127A (Virion/Serion)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>M. pneumoniae</i> IgM antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	Serion ELISA classic <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM Ref: ESR127M (Virion/Serion)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>M. pneumoniae</i> IgG antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	Serion ELISA classic <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG Ref: ESR127G (Virion/Serion)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Adenovirus</i> IgM antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	Adenovirus ELISA IgG/IgM Ref: G/M1004 (Viricell)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Adenovirus</i> IgG antitest kimutatás ELISA módszerrel 1	Adenovirus ELISA IgG/IgM Ref: G/M1004 (Viricell)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Treponema pallidum</i> specifikus IgM kimutatása Western blot módszerrel 1	recomLine Treponema IgM (ref.: 5173) (Mikrogen, Germany)	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Treponema pallidum</i> specifikus IgG kimutatása Western blot módszerrel 1	recomLine Treponema IgG (ref.: 5172) (Mikrogen)	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	<i>Treponema pallidum</i> specifikus IgM+IgG	Syphilis VirClia IgG+IgM Monotest (Viricell) VCM086	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 14/30

	kimutatása CLIA módszerrel 1,3				
Szérum, plazma	Parvovírus B19 specifikus antitest (IgM és IgG) kimutatás ELISA módszerrel 1	Parvovirus B19 IgM-ELISA (recombinant) NovaTec PARM0370 31082010-CR Parvovirus B19 IgG-ELISA NovaTech PARG0370 31082010-CR	Kvalitatív és szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Parvovírus B19 specifikus antitest (IgM és IgG) kimutatás Western blot módszerrel 1	recomLine Parvovirus B19 IgM (ref.: 4473); recomLine Parvovirus B19 IgG (ref.: 4472) (Mikrogen Diagnostik)	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	Varicella Zoster vírus specifikus ellenanyag kimutatás (IgG, IgM) ELISA módszerrel valamint VZV IgG kimutatás ELFA módszerrel 1,4	VZV ELISA IgG/IgM teszt (Viracell, Spain) L-GM1002-HU-03 VIDAS Varicella-Zoster IgG (VZG) Ref.: 30217, 054824-02 (bioMérieux)	Kvalitatív, szemikvantitatív kimutatás	1-14 nap	
Szérum, plazma	EBV specifikus IgM és IgG kimutatás Western blot módszerrel	recomLine EBV IgM (ref.: 4573); recomLine EBV IgG (ref.: 4572) (Mikrogen Diagnostik)	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	HEV specifikus IgM és IgG kimutatása ELISA módszerrel 1,4	abia HEV IgM ref.: DK.030.01.3; DK.030.05.3; abia HEV IgG ref.: DK.029.01.3; DK.029.05.3 (AB Diagnostic System GmbH, Germany)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	HEV specifikus IgM és IgG kimutatása ELFA módszerrel 1,4	VIDAS Anti-HEV IgM (HEVM) Ref: 418115, 048897-03-hu (BioMérieux); VIDAS Anti-HEV IgG (HEVG) Ref.: 418116, 048898-03-hu (BioMérieux)	Kvalitatív, szemikvantitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Légúti minta	RSV antigén kimutatás 1,2,3	RSV K-SeT (Ref: K-1506, K12-06) Coris BioConcept, Belgium	Kvalitatív	1 nap	
Légúti minta	Adenovírus antigén kimutatás 1	Immunkromatográfia One step adenovirus test (CerTest Biotec)	Kvalitatív	1-3 nap	
Szérum, plazma	SARS-COV-2 IgM kimutatás ELISA módszerrel 1	Serion ELISA <i>agile</i> SARS-CoV-2 IgM Ref: ESR400M (Virion/Serion)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	SARS-COV-2 IgG kimutatás ELISA módszerrel 1	Serion ELISA <i>agile</i> SARS-CoV-2 IgG Ref: ESR400G (Virion/Serion)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 15/30

Szérum, plazma	Rubeolavírus IgG ELISA módszerrel 1	Serion ELISA classic Rubella Virus IgG/IgM ref: ESR129G	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Légúti minta	SARS-CoV-2 PCR	Real-time PCR	Kvalitatív	24 óra	
Légúti minta, széklet, szemészeti minta, liquor, szerv minta	Adenovírus real-time PCR 1,4	Real-time PCR RealStar Adenovirus PCR Kit (Altona Diagnostics)	Kvantitatív	1-7 nap	
Szérum, plazma	HBc IgM kimutatás HBcAb pozitívitás esetén 1,4	VIDAS HBc IgM II (HBCM) Ref.: 30439, 048327-02 (BioMérieux)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	HBeAg és anti-HBeAg ELFA (HBsAg pozitív esetben végezzük el!)	VIDAS HBe/Anti-HBe Ref.: 30305, 054827-01 (BioMérieux)	Kvalitatív és szemikvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	HCV specifikus IgG ellenanyag kimutatás Western blot módszerrel 1,4	recomLine HCV IgG (ref.: 4372) (Mikrogen Diagnostik)	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	CMV specifikus IgG kimutatása ELFA módszerrel 1,4	VIDAS CMV IgG (CMVG) REF: 30204, 046053-03 (bioMérieux)	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	CMV IgG aviditás vizsgálat 1,4	VIDAS CMV IgG Avidity II (CMVA) REF: 413557, 049928-02 (bioMérieux)	Kvalitatív	1-14 nap	
Légúti minta	<i>C. pneumoniae</i> , <i>M. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>Legionella</i> sp., <i>B. pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i> real-time PCR 1,4	Allplex Respiratory Panel 4 (Respiratory Bacteria) (REF: RP9803X/RP10182Z, Seegene Inc, Korea)	Kvalitatív	1-7 nap	
Légúti minta, széklet, szemészeti minta, liquor, szerv minta	Enterovírus, adenovírus, parechovírus, parvovírus B19, mumps real-time PCR 1,4	Real-time PCR Allplex Meningitis-V2 Assay (Seegene)	Kvalitatív	1-4 nap	
Plazma, liquor, vizelet, légúti minta, szövet, magzatvíz	<i>Herpesviridae</i> – cytomegalovírus nukleinsav kimutatás real-time PCR módszerrel 1,4	artus CMV QS-RGQ teszt (REF: 4503363) Qiagen	Kvalitatív és kvantitatív	1-3 nap	
Plazma, liquor, hólyagbennék, légúti minta	<i>Herpesviridae</i> - herpes simplex 1-2 nukleinsav kimutatás real-time PCR módszerrel 1,4	artus HSV-1/2 QS-RGQ teszt (REF: 4500363) Qiagen	Kvalitatív és kvantitatív vizsgálat, amplifikálás után 1. és 2 típus megkülönböztethető	1-3 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 16/30

NEM akkreditált vizsgálatok Betegellátást (járó- és fekvő) szolgáló egyéb diagnosztikus vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Viológia-Szerológia-Molekuláris Diagnosztika					
Plazma, liquor, szervminta	<i>Herpesviridae</i> – Epstein-Barr vírus nukleinsav kimutatás real-time PCR módszerrel 1,4	artus EBV QS-RGQ teszt (REF: 4501363) Qiagen	Kvalitatív és kvantitatív	1-3 nap	
Plazma, liquor, hólyagbennék	<i>Herpesviridae</i> – varicella-zoster vírus nukleinsav kimutatás real-time PCR módszerrel 1,4	artus VZV QS-RGQ teszt (REF: 4502363) Qiagen	Kvalitatív és kvantitatív	1-3 nap	
Plazma, liquor	<i>Herpesviridae</i> – human herpesvirus 6 kimutatása PCR módszerrel	Sacace HHV6 Real-TM Quant (REF: V10-100FRT, TV10-100FRT, Sacace, Italy)	Kvalitatív és kvantitatív	1-7 nap	
Cervix, vizelet, szövetminta	Human papillomavírus nukleinsav kimutatás PCR módszerrel (high/low risk tipizálás) 1	Anyplex II HPV28 Detection kit (REF: HP7S00X, Seegene Inc, Korea)	Kvalitatív	1-14 nap	
Légúti minta	Influenzavírus A/B és RSV kimutatása real-time PCR módszerrel 1,4	Savvy*gen FluA, Flu B & RSV (Savyon Diagnostics Ltd, Israel, REF.: 612-01L/612-01H)	Kvalitatív	1-3 nap	
Alsó légúti minta, bronchoalveolaris-mosófolyadék	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex nukleinsav kimutatás 1,4	artus M. tuberculosis RG PCR kit (Ref.: 4555263, 4555265) (Qiagen)	Kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Különböző humán minták	Parvovírus B19 nukleinsav kimutatás 1,4	artus Parvo B19 RG PCR kit ((REF: 4506363), Qiagen	Kvalitatív és kvantitatív	1-14 nap	
Különböző humán minták	Bakteriális kórokozók azonosítása 1,4	PCR, szekvenálás Home-made	Kvalitatív vizsgálat	1-14 nap	
Liquor, széklet, légúti minta, hólyagbennék stb. vizsgálat irányától függően	Enterovírus, parechovírus, parvovírus B19, mumps, adenovírus kimutatása real-time PCR módszerrel 1,4	Allplex Meningitis-V2 Assay (REF: MG9500Y, Seegene Inc, Korea)	Kvalitatív	1-14 nap	
Teljes vér, fvs, magzatvíz, köldökzsinór vér	<i>T. gondii</i> kimutatása real-time PCR módszerrel 1,4	Sacace Toxoplasma gondii Real-TM (REF: P1-50FRT, Sacace, Italy)	Kvalitatív	1-14 nap	
Liquor	Bakteriális meningitis kórokozók (<i>N. meningitidis</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>L. monocytogenes</i> , <i>E. coli</i> K1) kimutatása real-time PCR módszerrel 1,4	Allplex Meningitis-B Assay (REF: MG9600Y, Seegene Inc, Korea)	Kvalitatív	1-3 nap	

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 17/30

NEM akkreditált vizsgálatok Betegellátást (járó- és fekvő) szolgáló egyéb diagnosztikus vizsgálatok					
A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Virologia-Szerologia-Molekuláris Diagnosztika					

Járványügyi célú szűrővizsgálatok az SZAKK klinikái részére

A VIZSGÁLT ANYAG	A VIZSGÁLAT MEGNEVEZÉSE *	ALKALMAZOTT MÓDSZER	ANALITIKAI JELLEMZŐK	ÁTFUTÁSI IDŐ	Megjegyzés
Vegyes humán vizsgálati anyag	MRSA szűrés betegek és dolgozók részére 1	Az IKAB módszertani levelében leírtak szerint	MRSA kvalitatív kimutatása	2-4 nap	
széklet vegyes humán anyagból	Multirezisztens kórokozók (pl. ESBL termelő baktérium, VRE, CPE stb.) jelenlétének kimutatása székletből és vegyes humán anyagból 1	Hagyományos módszerekkel, táptalajokon	Kvalitatív kimutatás	2-4 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók HCV ellenanyag szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók HBsAg szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók anti-HBsAg szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvantitatív és kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók HBcAb szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók HIV Ab/Ag szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvalitatív	1-14 nap	
Szérum, plazma	HBc IgM kimutatás HBcAb pozitivitás esetén 1	ELISA módszerrel	Kvantitatív és kvalitatív meghatározás	1-14 nap	
Szérum, plazma	Dolgozók syphilis öszszellenanyag (IgM+IgG) szűrése 1	ELISA módszerrel	Kvalitatív meghatározás	1-14 nap	

NEM akkreditált vizsgálatok

Vízmikrobiológia

Gyógyszertári készítmények	Gyógyszertári készítmények mikrobiológiai tisztasági vizsgálata	PhHg VIII. szerint	Baktériumok és gombák kvantitatív kimutatása	1	
----------------------------	---	--------------------	--	---	--

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerologia-molekuláris biológia , valamint a Parazitologia-szerologia-mikologia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 18/30

Tájékoztató

Vizsgálatkérések:

1. Intézetünk minden OEP szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatást végző beküldőtől fogad vizsgálati kéréseket.
2. Magánbetegeknek az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szabályozása szerinti finanszírozás ellenében végzünk vizsgálatot.
3. Egyedi szerződéskötésekre is lehetőség van magánorvosok, egyéb megrendelők számára. Ilyen irányú kérdésükkel, kérésükkel keressék Intézetünk munkatársait.

Mintavételi eszközök:

Intézetünk, igénylés és utólagos finanszírozás ellenében, korszerű mintavételi eszközöket bocsát rendelkezésre. Saját beszerzés esetén szakmai javaslatot adunk a megfelelő mintavételi eszközökre.

Vizsgálati anyagok beérkezése:

1. A Klinikai Központ területéről:
 - rendszeres központi anyagszállítás
 - egyedi, a beküldő által biztosított beszállítás
2. Klinikai Központon kívül:
 - a beküldő által biztosított beszállítás

Vizsgálati anyagok fogadása:

Bakteriológia Részleg Tel: 06-62-545958	Hétfőtől-péntekig: 8 ⁰⁰ -22 ⁰⁰ óráig <i>(21³⁰ óráig beérkező minták fontossági sorrendben kerülnek még aznap feldolgozásra)</i>	Szombat-vasárnap- ünnepnap: 8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ óráig
	Munkaidőn túl SÜRGŐS minta esetén a készenléti ügyeletes diplomás behívható. Klinikai Központon belül: 10-59	
Virológia – Szerológia-Molekuláris Diagnosztika Részleg Tel: 06-62-545888	Hétfőtől-péntekig: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ óráig <i>(8⁰⁰-14⁰⁰ óráig beérkező minták kerülnek még aznap regisztrálásra, vagy feldolgozásra a részleg saját munkarendjének megfelelően)</i> Külön utasítás esetén SARS-CoV-2 ügyelet.	SARS-CoV-2 ügyelet
Parazitológia-Szerológia-Mikológia Részleg Tel: 06-62-545402	Hétfőtől-péntekig: 8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ óráig <i>(gyorstesztek és sürgős anyagok feldolgozása, az egyéb mintákat a részleg saját munkarendjének megfelelően dolgozza fel).</i>	
SÜRGŐS vizsgálatkérésre van lehetőség telefonon történt egyeztetés alapján (4x-os elszámolási szorzó alkalmazásával).		
A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás, stb. esetén a heti beosztás változhat!		

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 19/30

Visszautasítandó minták:

Nem fogadható el a vizsgálati anyag, ha:

- az minden próbálkozás ellenére sem azonosítható, a mintavétel ismételt
- a kísérőlapra és a mintán feltüntetett adatok nem egyeznek *
- a minta megnevezése nincs feltüntetve *
- a vizsgálati anyag beszáradt
- a vizsgálati anyag a tartályból kifolyt, fertőzésveszélyes
- a mintaszállítás, tárolás közben annyira sérült, hogy kontaminálódhatott a környezettel, vagy eredeti állapota jelentősen sérült
- a mintavétel óta 24 óránál hosszabb idő telt el és a minta nem a megfelelő transzport közegben érkezett
- a mintavétel óta 48 óra vagy annál hosszabb idő telt el, még a transzport közegben érkezett is.

* Az intézet a hiányzó adatokat telefonon történő egyeztetés során megpróbálja tisztázni, a visszautasítás csak ennek sikertelensége esetén történik meg.

Anaerob feldolgozásra alkalmatlan anyagok:

- a mintavétel során a normál flórával történő kontaminációnak kitett anyagok
- száraz vattatamponon, vagy natívan érkezett anyag 30 percnél hosszabb ideig tárolt anyag
- Felső- és alsó légúti váladékok (torok, orr, nasopharyngeális váladék, szokásosan ürített vagy oro-, valamint nasotracheális leszívással nyert köpet, trachea, „mély vak” BAL), (kivéve a kettős lumenű katéterrel vett minta)
- nem kettőslumenű katéterrel vett bronchoscopos váladék
- spontán ürített, vagy katéteres vizelet (kivéve a suprapubikus aspirációval vett minta)
- gingiva tampon
- gyomor és vékonybél tartalom (kivéve, ha kontaminált vékonybél szindróma irányába történik a vizsgálat)
- vastagbél tartalom, széklet (kivéve, ha *C. botulinum* vagy *C. difficile* irányába történik a vizsgálat)
- vaginális vagy cervikális váladék (kivéve, ha BV irányába történik a vizsgálat)
- decubitális fekély felszínéről, illetve egyéb, sebfelszínről vett váladék
- nem megfelelően fertőtlenített bőr, vagy nyálkahártya felszínén keresztül vett vizsgálati anyag
- drain-csövek, CVC végek

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 20/30

Az SZTE SZAKK és SZAOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet

által kiadott mikrobiológiai leletek az alábbi információkat tartalmazzák:

- A laboratórium nevét, OEP kódját, pontos címét, telefonszámát, az intézetvezető nevét, honlap elérhetőséget, NAH által akkreditált státuszra való hivatkozási szám
- A minta sorszámát
- A beküldő pontos adatait
- A minta beérkezésének időpontját
- A betegre vonatkozó azonosító adatokat
- A mintavétel időpontját
- A vizsgálati anyag jellegét
- A leletezés időpontját
- Az ellenőrzés időpontját
- A mikrobiológiai vizsgálat eredményét
- Akkreditált vizsgálatoknál az akkreditáltságra való hivatkozást
- Megjegyzéseket, kiegészítéseket
- Az eddig elvégzett vizsgálatok kódszámait
- Ezek pontszámát
- A leletet kiadó diplomás kódját, nevét, végzettségét
- Az elvégzett vizsgálatok azonosítója megtalálható honlapunkon a Szolgáltatási jegyzékben.

***** 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 21/30

Leletátfordulási idő:

Bakteriológia	
Negatív eredmény	24-48 óra
Pozitív eredmény	48-72 óra
Hemokultúra negatív eredmény	5-21 nap
Hemokultúra pozitív eredmény	Pozitív jelzést követő 48 óra
Anaerob izolátumok esetén	4-7 nap
Gomba tenyésztés	7 nap
Lassan növekvő baktériumok esetén	5-21 nap
Mycoplasma, Ureaplasma kimutatás (genitális minta) negatív eredmény	2 nap
Mycoplasma, Ureaplasma kimutatás (genitális minta) pozitív eredmény	3-4 nap
<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás eredmény	1-3 nap
Virológia-Szerológia- Molekuláris diagnosztika	
Szerológiai vizsgálatok	1-14 nap, vizsgálatától függően
CMV, HSV1-2, EBV, enterovírus, parvovírus B19, TBC, légúti (PCR)	1-14 nap
HBV, HPV, <i>C.trachomatis</i> (PCR)	2-4 hét
HCV kvalitatív/ kvantitatív (PCR)	Egyeztetés szerint (kb. 4-8 hét)
Megfelelő számú vizsgálati anyag esetén a vizsgálatok a megadott határidőn belül elvégzésre kerülnek. Az egyes szerológiai vizsgálatokat a hét meghatározott napján végzik a részlegek, saját munkarendjüknek megfelelően.	
Parazitológia- Szerológia- Mikológia	
Parazitológiai- szerológiai- mikológiai vizsgálatok	1-30 nap, vizsgálatától függően
Fonális gomba tenyésztés esetén	1-30 nap
Megfelelő számú vizsgálati anyag esetén a vizsgálatok a megadott határidőn belül elvégzésre kerülnek. Az egyes szerológiai vizsgálatokat a hét meghatározott napján végzik a részlegek, saját munkarendjüknek megfelelően.	

Eredmény kiadás: MedSolon keresztül kért vizsgálatokat MedSolon keresztül küldjük vissza.

A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás esetén a heti beosztás változhat!

Szakmai konzultáció fertőzés okozta kórképek diagnosztikája és terápiája, mintavétel, beküldés módja témában ill. panasz és reklamáció esetén intézetünk munkatársaival:

Virológia, Virológiai szerológia, Molekuláris mikrobiológiai diagnosztika:

Dr. Terhes Gabriella egyetemi adjunktus, PhD, klinikai mikrobiológus

(06-62-545-888, 06-62-545959)

Dr. Sárvári Károly Péter egyetemi adjunktus, PhD, mikrobiológus szakorvos

(06-62-545-888, 06-62-545959)

Bakteriális infekciók:

Dr. Lázár Andrea klinikai főorvos, mikrobiológus szakorvos (06-62-545-958)

Dr. Sarkadi-Nagy Ágnes klinikai szakorvos, mikrobiológus szakorvos (06-62-545-958)

Dr. Orosz László klinikai szakorvos, PhD, mikrobiológus szakorvos (06-62-545-958)

Parazitológia, Szerológia, Mikológia:

Csányiné Dr. Dóczi Ilona klinikai mikrobiológus, PhD (06-62-545-402)

További szakmai konzultáció és terápiás javaslat :

Dr. Hajdú Edit osztályvezető egyetemi docens, PhD, mikrobiológus, infektológus szakorvos, SZTE SZAKK Infektológus konziliárus (Tel: Klinikai Központon belül hívható: 10-17), 24 órás elérhetősége biztosított munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt

Munkahelye: SZTE, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Osztály, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).

Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 22/30

Az SZTE SZAKK és SZAOK OMI által továbbított vizsgálatok célintézményei

Vizsgálatot végző laboratórium	Vizsgálat megnevezése	Vizsgálati anyag	Cím	Tel.:
Virologia				
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratórium (NAH-9-0006/2018 Nyilvántartási számon akkreditált)	HBsAg confirmáció (kithiány esetén) kimutatás Syphilis, HBsAg (várandósok szűrése)	szérum, plazma szérum, plazma	6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.	62/681-741

***** 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 23/30

Vizsgálatot végző laboratórium	Vizsgálat megnevezése	Vizsgálati anyag	Cím	Tel.:
Nemzeti Népegészségügyi Központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Viroológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0002/2022 nyilvántartási számon akkreditált) <i>Hepatitis és Herpesvírus osztály</i>	HHV-6 IgG kimutatás HHV-7 DNS és HHV-8 DNS HDV ellenanyag HDV RNS Hepatitis G vírus RNS	szérum, plazma plazma, liquor, hólyagbennék, egyéb váladékok szérum, plazma szérum Szérum	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.	06/1/4761100
Nemzeti Népegészségügyi Központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Viroológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0002/2022 nyilvántartási számon akkreditált) <i>Légúti Vírus osztály</i>	Influenza A/B Parainfluenza SARS RNS Parainfluenza ellenanyag Influenza ellenanyag	VTM-be felső és alsó légúti minta VTM-be felső és alsó légúti minta VTM-be felső és alsó légúti minta szérum szérum	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.	06/1/4761100
Nemzeti Népegészségügyi Központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Viroológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0002/2022 nyilvántartási számon akkreditált) <i>Általános vírusdiagnosztika</i>	Polio 1-3 ellenanyag Rubeola ellenanyag (megbetegedés gyanúja) Mumps ellenanyag Kanyaró ellenanyag (megbetegedés gyanúja) Rubeola RNS Mumps RNS Kanyaró RNS LCM ellenanyag Hantaan, Puumala, Seoul, Dobrava ellenanyag Dengue ellenanyag Kullancsencephalitis ellenanyag Nyugat-Nílusi láz ellenanyag Chikungunyavírus ellenanyag Sárgaláz vírus ellenanyag Krimi-kongói hemorrhagias láz ellenanyag	savópár szérum, plazma szérum, plazma szérum, plazma szérum, torokmosó, vizelet, magzatvíz szérum, torokmosó, szérum, torokmosó, vizelet, magzatvíz szérum, plazma, liquor szérum/plazma szérum, plazma szérum, plazma szérum, plazma, liquor szérum, plazma szérum, plazma szérum, plazma	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.	06/1/4761100

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerologia-molekularis biologia , valamint a Parazitologia-szerologia-mikologia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	Orvosi Mikrobiológiai Intézet Orvosi Mikrobiológiai Diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 25/30

Mikológia				
Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált)	<i>Pneumocystis jiroveci</i> DNS-kimutató és mikroszkópos vizsgálat <i>Aspergillus</i> sp. ellenanyag-kimutató Dimorf gombák elleni antitestek kimutatója	alsó légúti minták szérum, plazma szérum, plazma	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.	06/1/4761398
Parazitológia				
Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált)	Szöveti parazitózis mikroszkópos kimutatója, konfirmálás <i>Plasmodium</i> sp. DNS-kimutatója Taeniasis, trichinellosis, schistosomiasis, leishmaniasis szeroidiagnosztikája	szövetminta, vérkenet alvadásban gátolt (teljes) vér, egyéb minta szérum, plazma	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.	06/4761333

Közreműködő/Referencia laboratóriumok

Referencia laboratóriumok megnevezése	Laboratóriumot befogadó intézmény
Enterális megbetegedést okozó aerob baktériumok Nemzeti Referencia Laboratóriuma	Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Multirezisztens aerob Gram-negatív és Gram-pozitív baktériumok antibiotikum rezisztencia Nemzeti Referencia Laboratóriuma	Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Enterális és nosocomialis eredetű baktérium fajok (<i>Salmonella</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella</i> spp., <i>Serratia marcescens</i> , <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Enterobacter</i> spp., <i>P. aeruginosa</i> , MSSA, MRSA, CNS) Járványügyi tipizáló Nemzeti Referencia Laboratóriuma	Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Humán megbetegedést okozó protozoonok és helmintek Nemzeti Referencia Laboratóriuma	Nemzeti Népegészségügyi központ Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály Bakteriológiai, Mikológiai és Parazitológiai Laboratóriumi Osztály (NAH-9-0001/2022 nyilvántartási számon akkreditált) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Salmonella törzsek tipizálása, species szinten való megerősítése, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Osztály Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratóriumi Enterális Bakteriológiai részlegének vizsgálólaboratóriuma	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratórium (NAH-9-0006/2018 nyilvántartási számon akkreditált) 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11

Az NNK Referencia Laboratóriumainak teljes listáját ld.:

<https://nnk.gov.hu/index.php/mikrobiologiai-referencia-laboratoriumi-foosztaly>

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétfő kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül).
Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Orvosi Mikrobiológiai diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 26/30

Vírus szerológia/molekuláris heti beosztás

Vizsgálat	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	CMV IgM/IgG	Syphilis/RPR	Adenovírus IgM/IgG (1-2 hetente)	HBsAg	HSV-1/2 IgM/IgG	SARS-CoV-2 ügyelet RSV antigén	SARS-Cov-2 ügyelet RSV antigén
	EBV VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG	Hepatitis A IgM	<i>M. pneumoniae</i> IgM/IgA/IgG (1-2 hetente)	HCV Ab (IgM/IgG)	<i>Borrelia burgdorferi</i> IgM/IgG ELISA		
	Hepatitis A screening	HBsAg, HBcAb	VZV IgM/IgG (1-2 hetente)	<i>C. trachomatis</i> antigén EIA			
	RSV/Adenovírus antigén	HCV Ab (IgM+IgG)	* <i>Bartonella</i> IF (igény szerint ált. 2 hetente)	RSV/Adenovírus antigén	RSV/Adenovírus antigén		
	HEV IgG/IgM	HBsAb	Parvovírus B19 IgM/IgG				
	RSV/Adenovírus antigén	HIV Ab/Ag	* <i>Borrelia burgdorferi</i> Western blot (igény szerint)				
		RSV/Adenovírus antigén	RSV/Adenovírus antigén				
A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás esetén a heti beosztás változhat! A vizsgálatok beállítása a legtöbb esetben vizsgálati anyagszám függő! A vizsgálatokat reggeli munkakezdéssel 8 órakor indítjuk! Molekuláris vizsgálatokat igény szerint, megfelelő mintaszám esetén végezzük! A vizsgálat időpontjáról érdeklődjön a 62/545-888 számon!							

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül). Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Orvosi Mikrobiológiai diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 27/30

Parazitológia-Szerológia-Mikológia heti beosztás

Vizsgálat	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigénkimutatás	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigénkimutatás	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigénkimutatás	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigénkimutatás	<i>Cryptococcus neoformans</i> antigénkimutatás	Nincs ügyelet	Nincs ügyelet
	<i>Trichomonas vaginalis</i> tenyésztés	<i>Trichomonas vaginalis</i> tenyésztés	<i>Trichomonas vaginalis</i> tenyésztés	<i>Trichomonas vaginalis</i> tenyésztés	<i>Trichomonas vaginalis</i> tenyésztés		
	Szabadon élő amőba tenyésztése	Szabadon élő amőba tenyésztése	Szabadon élő amőba tenyésztése	Szabadon élő amőba tenyésztése	Szabadon élő amőba tenyésztése		
	Váladékból parazita mikroszkópos kimutatása	Váladékból parazita mikroszkópos kimutatása	Váladékból parazita mikroszkópos kimutatása	Váladékból parazita mikroszkópos kimutatása	Váladékból parazita mikroszkópos kimutatása		
	Parazita meghatározása	Parazita meghatározása	Parazita meghatározása	Parazita meghatározása	Parazita meghatározása		
	<i>Toxoplasma</i> szerológia (IgM, IgG, screen)	<i>Toxoplasma</i> szerológia (IgM, IgG, screen)	<i>Toxoplasma</i> szerológia (IgM, IgG, screen)	<i>Toxoplasma</i> szerológia (IgM, IgG, screen)	<i>Toxoplasma</i> szerológia (IgM, IgG, screen)		
	<i>Entamoeba histolytica</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Entamoeba histolytica</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Entamoeba histolytica</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Entamoeba histolytica</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Entamoeba histolytica</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)		

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül). Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Orvosi Mikrobiológiai diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 28/30

Parazitológia-Szerológia-Mikológia heti beosztás

Vizsgálat	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	<i>Echinooccus granulosus</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Echinooccus granulosus</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Echinooccus granulosus</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Echinooccus granulosus</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	<i>Echinooccus granulosus</i> ellenanyag-kimutatás (IHA)	Nincs ügyelet	Nincs ügyelet
	Gombaizolátumok azonosítása, antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata	Gombaizolátumok azonosítása, antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata	Gombaizolátumok azonosítása, antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata	Gombaizolátumok azonosítása, antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata	Gombaizolátumok azonosítása, antifungális szerek iránti érzékenységének vizsgálata		
Toxoplasma IgA: hetente egyszer vagy kétszer, anyagszámtól függően; Toxoplasma IgG aviditás: szükség szerint; Helicobacter pylori IgG ellenanyag kimutatása: kéthetente; Tococara canis IgG ellenanyag kimutatása: kéthetente; Candida albicans IgM és IgG ellenanyag kimutatása: havonta; Aspergillus (galaktomannán) antigén kimutatása: igény szerint, Echinococcus IgG antitest kimutatása: anyagszámtól függően.							
A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás esetén a heti beosztás változhat! A vizsgálatok beállítása a legtöbb esetben vizsgálati anyagszám függő! A vizsgálatokat reggeli munkakezdéssel 8 órakor indítjuk!							

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virológia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül). Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Orvosi Mikrobiológiai diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 29/30

Enterális heti beosztás

Vizsgálat	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel	Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel	Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel	Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel	Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel	Ügylet Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel <i>C. difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból <i>C. difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)	Ügylet Enterális kórokozó kimutatása tenyésztéssel <i>C. difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból <i>C. difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)
	<i>Clostridioides difficile</i> glutamát-dehidrogenáz antigén kimutatása ELISA módszerrel	<i>Clostridioides difficile</i> glutamát-dehidrogenáz antigén kimutatása ELISA módszerrel	<i>Clostridioides difficile</i> glutamát-dehidrogenáz antigén kimutatása ELISA módszerrel	<i>Clostridioides difficile</i> glutamát-dehidrogenáz antigén kimutatása ELISA módszerrel	<i>Clostridioides difficile</i> glutamát-dehidrogenáz antigén kimutatása ELISA módszerrel		
	<i>Clostridioides difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból	<i>Clostridioides difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból	<i>Clostridioides difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból	<i>Clostridioides difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból	<i>Clostridioides difficile</i> tenyésztés csak glutamát-dehidrogenáz antigén pozitív mintákból		
	<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)	<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)	<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)	<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)	<i>Clostridioides difficile</i> toxin kimutatás (Quik Chek gyorseszteszt sürgős kérés esetén)		
A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás esetén a heti beosztás változhat!							

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia , valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül). Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.

	Szegei Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar	MIKR-MM-19
	ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET Orvosi Mikrobiológiai diagnosztikai Laboratórium	Változat 37
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MELLÉKELETEI		Kiadva: 2022.06.20.
A KMDI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉKE		Oldal: 30/30

Enterális heti beosztás

Vizsgálat	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	Rotavírus/adenovírus antigén	Rotavírus/adenovírus antigén	Rotavírus/adenovírus antigén	Rotavírus/adenovírus antigén	Rotavírus/adenovírus antigén	Ügyelet Rotavírus/adenovírus antigén	Ügyelet Rotavírus/adenovírus antigén
	Norovírus antigén EIA		Norovírus antigén EIA		Norovírus antigén EIA		
	<i>Helicobacter pylori</i> antigénkimutatás	<i>Helicobacter pylori</i> antigénkimutatás	<i>Helicobacter pylori</i> antigénkimutatás	<i>Helicobacter pylori</i> antigénkimutatás	<i>Helicobacter pylori</i> antigénkimutatás		
	Féregpete-protozoon kimutatása (anorectalis törlés, széklet)	Féregpete-protozoon kimutatása (anorectalis törlés, széklet)	Féregpete-protozoon kimutatása (anorectalis törlés, széklet)	Féregpete-protozoon kimutatása (anorectalis törlés, széklet)	Féregpete-protozoon kimutatása (anorectalis törlés, széklet)		
				<i>Entamoeba histolytica</i> antigénkimutatás			
				Giardia lamblia antigénkimutatás			
A változtatás jogát a tervezett vizsgálatok esetén fenntartjuk! Sürgős vizsgálatok, készülék karbantartás esetén a heti beosztás változhat!							

* 1. munkaidőben, 2. ügyeletben, 3. kérésre sürgősséggel végzett vizsgálatok, 4. Virologia-szerológia-molekuláris biológia, valamint a Parazitológia-szerológia-mikológia részleg által sürgősséggel végzett vizsgálat (hétvége kivételével a minta beérkezésétől számított 24 órán belül). Indokolt esetben, szakmai szempontok alapján sürgős vizsgálatkérésre van lehetőség.